

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863) 264-31-56; (863) 308-17-56

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.


Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.

Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

Инструкции к слуховым аппаратам

Обзор

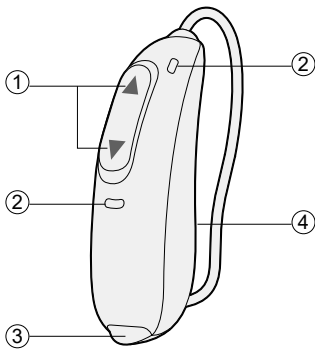

- ① Многофункциональная кнопка
- ② Отверстие микрофона с защитой от ветра и непогоды
- ③ Батарейный отсек с функцией вкл./выкл. (размер батареи 312*)
- ④ Маркировка стороны (правая=красная, левая=синяя), размещается на name plate


* Два длинных гудка указывают на необходимость скорой замены батарейки.

Использование слухового аппарата


① Многофункциональная кнопка

Стандарт

Короткое нажатие


 **Громкость**
±10 дБ (±5 шагов)

Длительное нажатие



 **Смена программ**
▲ AutoSense OS... (Исходная)
1 Тихая ситуация 1
2 Тихая ситуация 2
Кнопка "вниз" обладает той же функцией

Стриминг

Короткое нажатие


 **Громкость стриминга***
±10 дБ (±5 шагов)
* Увеличение ослабит окружающие звуки, и наоборот


Длительное нажатие

 **Смена программ**
▲ AutoSense OS... (Исходная)
1 Тихая ситуация 1
2 Тихая ситуация 2
 Стриминг
Кнопка "вниз" обладает той же функцией


Телефонный звонок

Короткое нажатие

 **Принять звонок**
(во время звонка)
Кнопка "вниз" обладает той же функцией

 **Громкость телефона***
±10 дБ (±5 шагов)
* Увеличение ослабит окружающие звуки, и наоборот

Длительное нажатие

 **Отклонить/завершить звонок**
Кнопка "вниз" обладает той же функцией

Инструкции к слуховым аппаратам

Включение слухового аппарата

Включите слуховой аппарат, закрыв батарейный отсек.

Выключение слухового аппарата

Выключите слуховой аппарат, открыв батарейный отсек. Ногтем приоткройте батарейный отсек, чтобы он зафиксировался в положении Выкл.

Доступные программы

Автоматически (исходная программа) *Мелодия*

Эта программа автоматически адаптируется к меняющемуся окружению для обеспечения оптимальной четкости и комфорта в различной обстановке.

1 Тихая ситуация 1 1 гудок

Эта программа предлагает оптимальную настройку для наилучшего восприятия речи и комфорта при разговоре один на один и пребывании в тихой обстановке.

2 Тихая ситуация 2 2 гудка

Эта программа предлагает оптимальную настройку для наилучшего восприятия речи и комфорта при разговоре один на один и пребывании в тихой обстановке.

AutoSense OS 3.0 (стриминг)

Автоматически обнаруживает присутствие речи или музыки. Плавно переключается между передачей речи и музыки для оптимизации ваших слуховых ощущений.

Активация "TV Connector" и стриминга

При обнаружении стриминга его программа активируется автоматически.

Программы стриминга

PartnerMic + микр.

При обнаружении PartnerMic его программа активируется автоматически.

Телефонный звонок + микр.

Эта программа оптимизирована для телефонных звонков по Bluetooth. Ваш голос улавливается микрофоном слухового аппарата, как в гарнитуре. Чтобы принять звонок, коротко нажмите на кнопку "верх" или "вниз" на слуховом аппарате. Длительное нажатие (> 2 секунд) отклоняет звонок. Кроме того, вы можете принять и отклонить звонок непосредственно на вашем мобильном телефоне.

RogerDirect + микр.

При обнаружении RogerDirect его программа активируется автоматически.

Режим сопряжения

После закрытия дверцы батарейного отсека слуховой аппарат будет в режиме сопряжения в течение 3 минут.

Имя Bluetooth:

П-Phonak слуховой аппарата

Режим полета

Для входа в режим полета выключите слуховой аппарат. Затем нажмите и удерживайте кнопку "вниз", одновременно закрывая дверцу батарейного отсека. Удерживайте кнопку нажатой не менее 7 секунд.

Для выхода из режима полета выключите и вновь включите слуховой аппарат.

Функции стриминга

Телефонный звонок

В сочетании с вашим мобильным телефоном можно принимать, отклонять или завершать звонки с помощью слухового аппарата.

Медиа-стриминг

Стриминг из устройства Bluetooth в слуховой аппарат начинается автоматически.

Управление касанием

При надетом слуховом аппарате дважды коротко коснитесь ушной раковины. Это позволит принять/отклонить телефонный звонок, приостановить/возобновить стриминг и включить/выключить голосовой помощник.

Аксессуары Phonak

Стриминг из аксессуара Phonak в слуховой аппарат можно начать автоматически или вручную.

Для получения дополнительной информации посетите страницу поддержки:

<https://product-support.phonak.com>



Инструкции к слуховым аппаратам

Доступные приложения

Для получения подробной информации о доступных приложениях, пожалуйста, посетите:

www.phonak.com/availableapps

